



LA ACD 209 - #2

GTIN (01) 9 3509020 00211

Lot (10) 15341

2024-09-01

2027-08-31

VERWENDBAR BIS

REF A640005

Distributor:

PFM MEDICAL HICO GmbH •
Wankelstr. 60, 50996 Köln, Germany

AMNICOT

Das ideale Instrument für die gezielte Amniotomie

Gebrauchsanweisung beachten

1. Ziehen Sie Amnicot über Zeige- oder Mittelfinger der behandschuhten rechten oder linken Hand.
2. Verwenden Sie Amnicot, bis sich das Haken zur Handfläche hin ausgerichtet hat (siehe Abbildung oben).
3. Damit der Haken während des Gebrauchs in Position bleibt, streifen Sie Amnicot eng über den Finger und bringen Sie es in die gewünschte Position, während Amnicot erst ca. 1 cm aufgerollt ist.
4. Sobald das Amnicot angebracht ist, führen Sie einen anderen Finger durch den Gebärmutterhals ein, um nach Kontraindikationen für die Durchführung der Amniotomie zu suchen.
5. Ziehen Sie den Sondierungsfinger zurück und führen Sie dann den mit dem Amnicot versehenen Finger durch den Muttermund ein.
6. Kratzen Sie sanft an den Membranen, um sie zu reißen. Prüfen Sie nach ein oder zwei gut ausgeführten Bewegungen des Hakens, den Flüssigkeitsaustritt.
7. Nach dem Eingriff prüfen, ob das Produkt intakt ist, bevor es entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt wird.



Vorsicht • Fruchtblase nicht mit zu starkem Druck öffnen.
• Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist.

De Medical Instruments Pty Ltd
ABN 99 008 019 359 • Tel: 487 018 9388 1700 •
200 Churchill Ave, Subiaco 6008, Australia • WebSite: www.gomedical.com.au

Advena Limited

Tower Business Centre, 2nd Flr, Tower Street, Swale, BR1 4D13 Malton
medifleg GmbH
Weyersmattstrasse 12, 3008, Bern, Switzerland



CE 2797

LA ACD 736#4